


# Incidin<sup>®</sup> Pro

Lider wśród Profesjonalnych Produktów  
do bezaldehydowej dezynfekcji powierzchni

**NOWOŚĆ!**

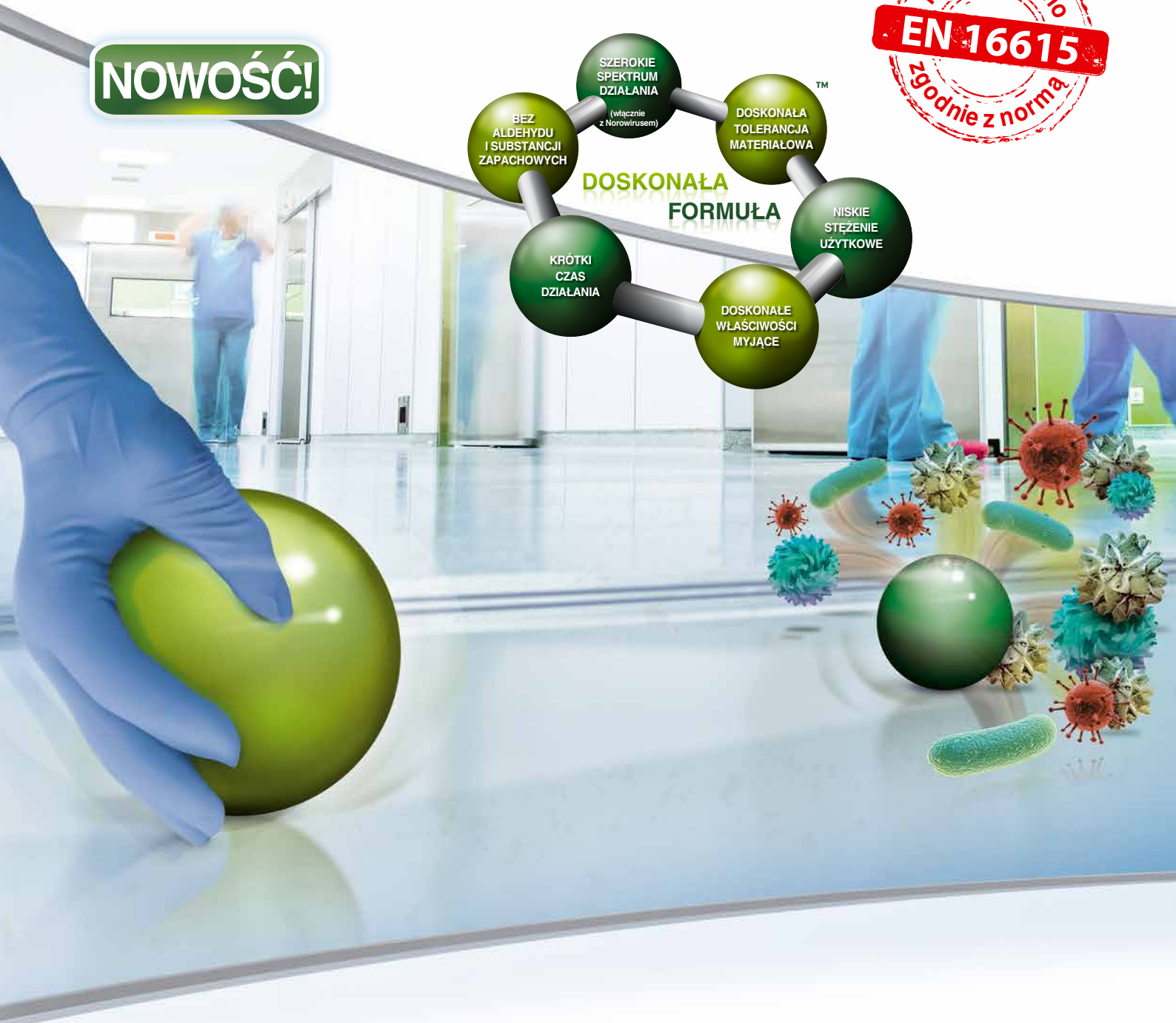

**ECOLAB<sup>®</sup>**

Everywhere It Matters.

Incidin® Pro

**NOWOŚĆ!**

## Wydajna dezynfekcja powierzchni bez zawartości aldehydów



Doskonale dobrana formuła to nowy standard w Profesjonalnym myciu i dezynfekcji powierzchni.

**SZEROKIE  
SPEKTRUM  
DZIAŁANIA**  
(włącznie  
z Norowirusem)

### SZEROKIE SPEKTRUM DZIAŁANIA

Produkt został przetestowany zgodnie z normami EN oraz wytycznymi DGHM i DVV co potwierdza jego szerokie spektrum działania, łącznie z Norowirusem, dając użytkownikowi pełną i Profesjonalną ochronę podczas procesu dezynfekcji.

**PRODUKT POSIADA POZYTYWNĄ OPINIĘ INSTYTUTU MATKI I DZIECKA NR OP-ZF/311/K-3/15.**

Twoje Profesjonalne podejście do spektrum działania

**KRÓTKI  
CZAS  
DZIAŁANIA**

### KRÓTKI CZAS DZIAŁANIA W POŁĄCZENIU Z NISKIM STĘŻENIEM UŻYTKOWYM

15 min/1,0%	Dezynfekcja powierzchni wg DGHM, metodyka 2001	✓
5 min/1,0%	EN 16615 bakteriobójczy EN 16615 drożdżobójczy	✓
60 min/1,5%	EN 14348 prątkobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy	✓
15 min/0,5%	Działanie wirusobójcze wg RKI 01/2004	✓
60 min/2,0%	Adeno	✓
5 min/1,5%	Rota	✓
30 min/1,5%	Norowirus EN 14476 (MNV)	✓

Pełne wyniki badań: patrz ostatnia strona broszury.

**NISKIE  
STĘŻENIE  
UŻYTKOWE**

Twoje Profesjonalne podejście do szybkości działania

### INCIDIN® PRO

ZAPEWNI  
KOMPATYBILNOŚĆ  
Z URZĄDZENIAMI  
DOZUJĄCYMI DG1, DG3  
ORAZ Z SYSTEMEM  
SUCHYCH CHUSTECZEK  
INCIDIN® DRY WIPES.



**94%**Lepszy lub  
zdecydowanie lepszy**DOSKONAŁE WŁAŚCIWOŚCI MYJĄCE**

W testach przeprowadzonych w wybranych szpitalach europejskich potwierdzono wysoką skuteczność mycia produktu.

94% klientów oceniło Incidin® Pro jako lepszy lub zdecydowanie lepszy w porównaniu do obecnie używanego produktu.

Twoje **Profesjonalne** podejście do właściwości myjących

**DOSKONAŁE  
WŁAŚCIWOŚCI  
MYJĄCE****100%**Zdecydowanie  
lepszy**DOSKONAŁA TOLERANCJA MATERIAŁOWA**

Incidin® Pro to nie tylko szerokie spektrum działania, ale również doskonała tolerancja materiałowa począwszy od metali, linoleum i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne.

100% klientów w testach porównawczych oceniło produkt jako „zdecydowanie lepszy” w porównaniu do obecnie używanego produktu.

**DOSKONAŁA  
TOLERANCJA  
MATERIAŁOWA****BEZ ALDEHYDU I SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH**

Incidin® Pro nie posiada substancji lotnych i zapachowych, co zapewnia wygodne i bezpieczne stosowanie produktu. Formuła bez zawartości substancji zapachowych zmniejsza ryzyko podrażnień skóry oraz reakcji alergicznych.

100% klientów, którzy testowali produkt oceniło zapach jako przyjemny.

Twoje **Profesjonalne** podejście do tolerancji materiałowej

**BEZ  
ALDEHYDU  
I SUBSTANCJI  
ZAPACHOWYCH****ENCOMPASS™**  
Hygiene Intelligence**UCZYŃ  
NIEWIDOCZNE  
WIDOCZNYM**

Program do monitorowania i poprawy poziomu higieny powierzchni.

Wspiera działania z zakresu profilaktyki zakażeń poprzez możliwość podniesienia poziomu higieny. Pomaga zmniejszyć ryzyko transmisji patogenów.

O szczegółowe informacje dotyczące programu zapytaj Konsultanta ds. higieny.



## Incidin® Pro

Lider wśród Profesjonalnych Produktów do bezaldehydowej dezynfekcji powierzchni

**NOWOŚĆ!**

### WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I WIRUSOLOGICZNYCH

SPEKTRUM DZIAŁANIA	STĘŻENIE		CZAS DZIAŁANIA
	(%)	ml/l	
EN 16615 Test 4 pól (warunki brudne) bakteriobójczy, drożdżobójczy	1,0	10	5 min
EN 16615 Test 4 pól (warunki czyste i brudne) bakteriobójczy, drożdżobójczy	0,5	5	15 min
EN 13697 (warunki czyste) bakteriobójczy	0,25	2,5	5 min
EN 13697 (warunki czyste) drożdżobójczy	0,1	1	5 min
EN 14348 (warunki czyste i brudne) prątkobójczy, bójczy wobec prątków gruźlicy	1,5	15	60 min
EN 14476 (warunki czyste i brudne) Norowirus mysy (MNV)	1,5	15	30 min
EN 1276 (warunki czyste i brudne) bakteriobójczy	0,5	5	5 min
EN 1650 (warunki czyste i brudne) drożdżobójczy	0,25	2,5	5 min
Adeno*	2,0	20	60 min
Polyoma SV 40*	1,5	15	15 min
Rota*	1,5	15	5 min
Norowirus mysy (MNV)*	1,5	15	30 min
Prątkobójczy wg metodyki IGiChP	3,0	30	30 min
Dezynfekcja powierzchni z udziałem czynnika mechanicznego wg DGHM (Niemieckie Towarzystwo Higieny i Mikrobiologii), metodyka 2002r. (warunki czyste i brudne), bakteriobójczy, drożdżobójczy	1,0 0,5	10 5	15 min 30 min
Zgodnie z zaleceniem RKI (Instytut Roberta Kocha) 01/2004, wirusobójczy wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV, HIV)	0,5 0,25	5 2,5	15 min 30 min

\*Zgodnie z DVV 2008 (Niemieckie Stowarzyszenie Zwalczenia Chorób Wirusowych)

**SZYBKI.  
SKUTECZNY.  
ZAAWANSOWANY.**

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Incidin® Pro to płynny koncentrat, przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym.

### SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Przygotować roztwór dezynfekcyjny o wymaganym stężeniu przez rozcieńczenie w wodzie (temp. max. 30°C). Zwilżyć dezynfekowaną powierzchnię, stosować standardową procedurę dotyczącą zmywania powierzchni.

### SKŁAD

100 g preparatu jako substancje aktywne zawiera:  
10,0 g 2-fenoksyetanolu,  
8,0 g N,N-bis-(3-aminopropyl) dodecyloaminy,  
7,5 g chlorku benzalkoniowego.

### DOSTĘPNE OPAKOWANIA

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Saszetka 20 ml	400 szt.	3076540
Butelka 2 l	3 szt.	3076660
Kanister 6 l	1 szt.	3076750

### OPINIE

Liczne badania mikrobiologiczne i wirusologiczne - na Państwa prośbę chętnie udostępnimy opinie.

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.  
Środki dezynfekcyjne stosuj bezpiecznie.  
Przed użyciem zapoznaj się z etykietą produktu.

Więcej informacji na stronach

[www.ecolab.pl](http://www.ecolab.pl)

lub u naszych konsultantów.